




「推奨する歯科ホワイトニング」賞 7年連続受賞！

※ 賞を授与したデンタルアドバイザー社は、ミシガン州に本拠を置く信頼性の高い臨床評価会社です

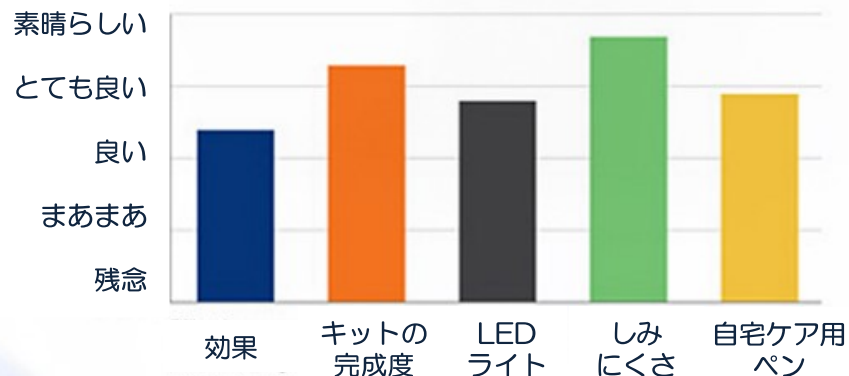

WHITENING
IN-OFFICE
2015-2021

「患者様の姿勢に合わせてやすい柔軟なネックの照射器」

「短時間で簡単なオフィスホワイトニング」

簡単な ホワイトニング

準備はわずか1分。
20分で2~5段階白くなる

詳細 → p.3

環境に適した製品

世界初の環境に優しい
ホワイトニングシステム

詳細 → p.4

選ばれる理由

全米10,000以上の
歯科医院に選ばれる理由

詳細 → p.5



高い効果を短時間で簡単に

シンセーショナルスマイルは、施術時間わずか20分の独自のオフィスホワイトニングシステムです。あらかじめホワイトニングジェルが充填されたシリコントレイ（特許取得済）を用い、短時間で結果を出す画期的な技術です。このトレイは、顎をリラックスした状態にしますので、楽に施術を受けられます。LEDライトを照射することにより、ホワイトニングジェルの有効成分をいち早く浸透させ、短時間で美しく輝く白い歯を実現させます。自宅ケア用のペンもついていきますので、ご自宅でも毎日ケアをし、素敵な笑顔を長持ちさせることができます。



歯科医師のナンバーワンチョイス

デンタルアドバイザー社から「推奨する歯科ホワイトニング」賞を2015年から2021年まで7年連続で授与され、また、アメリカ合衆国内の数々の大手ディーラーが年間に最も取り扱う歯科ホワイトニングシステム。合衆国内の10,000以上の歯科医院が、シンセーショナルスマイルを既に導入していますし、世界で唯一、環境に適合したホワイトニングシステムとしても認定を受けています。デンタルアドバイザー社から臨床評価91%の「4+」の評価を受けている、米国内でも一流の歯科ホワイトニングシステムです。

※ デンタルアドバイザー社 …米国ミシガン州に本拠を置く、信頼性の高い臨床評価会社。1983年創設。




しみや痛みを感じにくい

シンセーショナルスマイルは、効果が高く、お財布に優しく、しみや痛みを感じにくいホワイトニングです。特許も取得しているこの方法は、従来の歯科ホワイトニングにありがちな、歯肉ダム準備にかかる決して快適ではない時間や開口器を必要としません。その秘密は独自のシリコントレイにあり、施術中に歯が酸素に触れることを防ぎつつ急な痛みやひりひりとした痛みを感じにくい施術で、ジェルの効果を持続させます。



一流の価値


シンセーショナルスマイルは、少なくとも半年に一度は再度ホワイトニングの施術を受けられることをお勧めしています。しみを感じにくく20分で効果が出るのが臨床的に証明された、米国内で最も成功しているホワイトニングシステムです。わずか1分の準備時間と1回の施術のみで2から5段階色味が明るくなる、お財布にも環境に優しいこのシステムは、多くの人に愛されています。

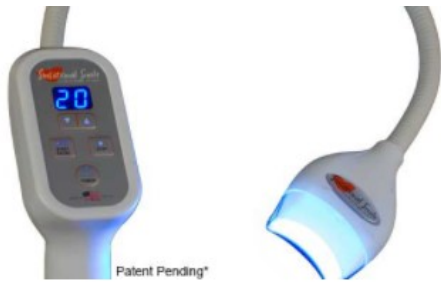

ホワイトニングのメソッドと施術

短時間、簡単、お財布に優しい

- しみを感じにくく20分で効果が出るのが臨床的に証明された、米国内で最も成功しているホワイトニングシステムです。準備時間はわずか1分にもかかわらず短時間で歯の色が2段階から5段階明るくなり、しかも環境にも優しいこのシステムは、多くの方に愛されています。
- 患者様の口にぴったりフィットする独自のシリコントレイ（特許取得済）は、顎をリラックスしたままにできますので、20分間の施術をとて快適に受けられます。
- LEDライトの照射は、環境にも優しいホワイトニングジェルの有効成分をいち早く反応させ、短時間で白く輝く歯を実現させます。施術後には、自宅ケア用のペンをお持ち帰りいただけます。
- 快適ではない歯肉ガムや開口器は必要なく、診察台に座ったまま準備を待つ必要もありません。最も高い効果を持続するために、6カ月に一度は再度ホワイトニングの施術を受けることをお勧めします。医院でのクリーニングを受けた後に行うと、効果が最も高くなります。
- 歯が白くなるだけでなく、外見に自身が持てるようになります。私たちは、施術を受けられる皆様が、わずか20分で美しい笑顔を実現できるようお手伝いいたします。

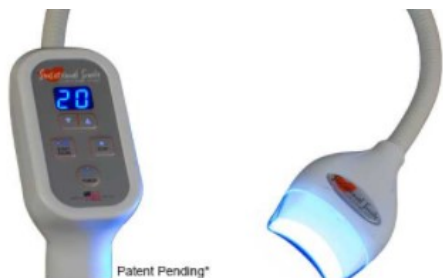

認定を受けた環境に優しいホワイトニングシステム

オーガニックである

♥ シンセーショナルスマイルは、Eco-Dentistry Association® (EDA：(直訳)環境歯科学協会) から「環境に優しい」として認定を受けた世界初のホワイトニングシステムです。EDA公認シールは、環境に優しい製品とサービスに与えられる、歯科業界における唯一の包括的な基準です。

♥ EDAは、シンセーショナルスマイルの製品の成分が「使用上の注意」を全く必要としないGRAS (Generally Regarded as Safe：(訳)概して安全と認められる) であるだけでなく、環境保全に対して並々ならぬ企業努力をしている、という理由で「公認シール」を授与しました。シンセーショナルスマイルの製造施設は、LEED (建築や都市の環境性能を評価する認証システム) として認定された建物に入っています。この建物は、最良の「グリーンビルディング」工法と資材を用い、電力も屋根に設置した太陽光パネルから賄っています。そこで生産される製品は、リサイクルできるシリコントレイ (ビスフェノールAを全く含まない) を使用した、初のホワイトニング製品でもあります。

♥ シンセーショナルスマイルは、LEEDとして認定された建物の中に製造施設を置く環境に適合した事業者です。あらかじめ薬剤を充填したトレイを使い、注入器などは使用しないので、廃棄物の量を減らすことができます。また、患者様の健康に懸念を与えるような科学化合物 (ビスフェノールAや二酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム等の有害な科学物質) も使用しておりません。また、Oceanaはじめ複数の環境保護団体に寄付を行っております。

Eco-Dentistry Association®について

♥ Eco-Dentistry Association® (EDA：(直訳)環境歯科学協会) は、環境に配慮した歯科診療を実践するためのアドバイスを歯科医療従事者に行っております。そして、患者様が、健康や環境に対する責任に対し共通の価値観を持つ歯科医院と出会えるよう架け橋としての役割も担っています。会員の歯科医院は、廃棄物や環境汚染の減らし方やエネルギー・水・コスト削減の方法等の環境に優しい診療の取り入れ方を、健康に重点を置いた診療方法や最先端の歯科診療方法と共に学んでおります。

製品比較

他社製品との比較	 <i>Sinsational Smile</i> <small>A smile so bright, it's sinful.</small>	他社製品
施術時間	20分	1.5 ~ 2時間
1回あたりの費用	1 ~ 2万円程度	4 ~ 5万円程度
快適さ	快適	快適ではない
開口器とダムの必要性	必要	不要
しみる可能性	しみにくい	しみる
自宅ケア用ペン（無料）	ついてくる	ついてこない
環境適合製品 （北米での認定）	適合	適合ではない
米国製	Yes!	???
顧客満足度	😊	😞